

Beställningsreferenser

Reagenser

CALPROGOLD™

REF		CONT
SDBUF-B00	Provspädningsbuffert	2 x 70 mL
SDBUF-H00	Provspädningsbuffert	8 x 70 mL
SDBUF-L00	Provspädningsbuffert	16 x 70 mL

Andra nödvändiga produkter

REF		CONT
CACOL-B00	Universellt kit	1 x 18 mL R1 + 1 x 7.5 mL R2
CACOL-H00	Universellt kit	3 x 18 mL R1 + 3 x 7.5 mL R2
CACOL-L00	Universellt kit	7 x 18 mL R1 + 7 x 7.5 mL R2
CAREK-000	Kalprotektin Kalibrerings kit (6 nivåer)	6 x 1 mL
CACOS-002	Kalprotektin Kontroll, "låg"	1 x 2 mL
CACON-002	Kalprotektin Kontroll, "Medium"	1 x 2 mL
CACOX-002	Kalprotektin kontroll, "hög"	1 x 2 mL
CAL0510	Calpro EasyExtract™	50 extraktionsrör

Användningsområden - Syfte

Provutspädningsbuffert är en utspädning buffert som är nödvändig för koncentrationsbestämning av kalprotektin i fekalt extrakt.

Principen för testet

Guldpartiklarna i kolloidal form stabiliseras med användning av monoklonala antikroppar riktade specifikt mot humant kalprotektin. Dessa antikropps-konjugat bildar en specifik agglutination vid reaktion med humant kalprotektin tillgänglig i humana prover. Denna agglutination, direkt proportionell med koncentrationen av kalprotektin i provet, läses av vid 546nm och 600nm.

Varning och försiktighetsåtgärder

- Endast för in vitro-diagnostik.
- Måste hanteras av kvalificerad personal.
- Alla produkter av humant ursprung har screenats och funnits negativa för HIV 1- och 2-antikroppar, HVC-antikroppar och Hepatit B antikroppar. Alla reagenser i produkten bör likväl behandlas med försiktighet och som potentiellt smittfarliga.
- Dessa produkter innehåller natriumazid och måste därför hanteras med försiktighet: undvik förtäring och kontakt med hud eller slemhinnor. Natriumazid blir explosiv vid kontakt med tungmetaller som koppar eller bly.

Buffert

Sammansättning och koncentrationer/Lagring

Aktiva komponenter:

Inga

Andra komponenter:

Buffert, stabilisator, oorganiskt salt och konserveringsmedel.

Förvaringstemperatur: 2 - 8 °C.

SDBUF Generell IFU SE v00 08/04/22



Förberedelse

Klar att användas.

Lagring och stabilitet

Reagenser är stabila fram till utgångsdatumet tryckt på förpackningen (månader passerade), under följande rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden:

- Öppnad vial förvaras vid den temperatur som anges på förpackningen.
- Öppnad vial stängs omedelbart efter användning eller placeras i en stängd analysator avsedd för detta ändamål, inte kontaminerad genom hantering och förvaras vid den temperatur som anges på förpackningen.
- Reagens skickas vid 2–8°C.

OBS:

- Frys inte buffert

Andra material som krävs





















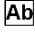
Vanlig laboratorieutrustning inklusive ett analysystem utrustat med en fotometrisk detektor.


Användnings förfarande


Om applikationen inte är installerat på ert instrument, vänligen kontakta Calpro AS. CE-validerade applikationer är tillgängliga från Calpro AS. För en detaljerad beskrivning av hur ni kör en analys, vänligen se bruksanvisningen för ditt system.

Förklaring av symboler

Följande symboler kan finnas på förpackningen och etiketten:

	Lot/Parti-kod		Buffert
	Sista förbrukningsdag		Kalibrator
	Ansvarig Producent		Hög
	Medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik		Medium
	Temperatur vid lagring		Låg
	Katalognummer		4 nivåer
	Läs bruksanvisningen		5 nivåer
	Reagens		6 nivåer
	Kit		Kontroll
	Innehåll		Denna produkt uppfyller kraven i EU-direktivet 98/79 EC angående medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik
	Antikropp eller Antiserum		Spåra versionsändringar

 Diagam Huvudkontor	Diagam Belgien: Rue du Parc Industriel 40, 7822 Ghislenghien, Belgien Avenue Louis Lepoutre 70, 1050 Bruxelles, Belgien
---	--

Distribueras av:	Calpro AS, Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norge, och dess auktoriserade representanter. www.calprogold.com 
------------------	--

Alla produktnamn, registrerade varumärken, företagsnamn i detta dokument förblir respektive ägares egendom.